



BLUSHAPE

INNOVAZIONE
TECNOLOGIA
DESIGN
EFFICACIA
SICUREZZA



MADE IN ITALY



WWW.BLUSHAPE.IT

35 ANNI DI ESPERIENZA

NELLA PROGETTAZIONE E NELLA PRODUZIONE FULL MADE IN ITALY
DI APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE
PER ESTETICA AVANZATA



35TH ANNIVERSARY



35 ANNI DI ESPERIENZA

NELLA PROGETTAZIONE E NELLA PRODUZIONE FULL MADE IN ITALY
DI APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE
PER ESTETICA AVANZATA



Tutti i dispositivi BLUSHAPE, pur appartenendo alla categoria dei dispositivi per estetica e quindi conformi al DM206/2015, vengono progettati e realizzati con la stessa severità ed attenzione ai dettagli riservate ai dispositivi per medicina e medicina estetica.

Tutte le azioni fisiologiche dell'energie generate dai dispositivi BLUSHAPE sono giustificate da principi fisici e da comprovati effetti riscontrati dalla medicina.



MADE IN ITALY

BLUSHAPE nasce nel 1989 come azienda specializzata nella progettazione e produzione di apparecchiature mediche, per medicina estetica ed estetica avanzata. 35 anni di presenza nel settore hanno permesso di concepire dispositivi sempre all'avanguardia nei materiali, nel design, nella tecnologia e nella sicurezza delle energie applicate.

Tutte le apparecchiature BLUSHAPE sono progettate e prodotte integralmente in Italia: hardware elettronico, strutture esterne del contenitore, testine di trattamento fino ad arrivare al software. Non tutte le aziende possono vantare queste prerogative; la maggior parte dei produttori di apparecchiature, nella realtà, acquistano schede elettroniche e manipoli già pronti o progettati da altre aziende.

Noi di BLUSHAPE abbiamo preferito concentrare i nostri sforzi sul PROGETTO TOTALE.

Grazie ai suoi ricercatori e progettisti, con esperienza trentennale, BLUSHAPE progetta e produce tutto nei suoi laboratori anche per avere il completo controllo della qualità e la perfetta compatibilità di tutte le parti della macchina.

Questo garantisce al cliente materiali e prestazioni di qualità, velocità di assistenza tecnica e rapida disponibilità dei pezzi di ricambio anche per dispositivi molto vecchi.

La qualità si riflette inoltre nell'efficacia delle energie generate dalle apparecchiature BLUSHAPE.

SICUREZZA TOTALE

Anni di progettazione e produzione di apparecchiature in ambito medico hanno formato nei progettisti BLUSHAPE una coscienza professionale che va ben oltre la normale conformità alle normative vigenti. Infatti può non bastare che un apparecchio sia conforme alla norma elementare di sicurezza elettrica. I progettisti BLUSHAPE infatti ritengono che, in materia di sicurezza, si debba tener conto degli effetti fisiologici sull'organismo in relazione alle caratteristiche dell'energia usata: noi di BLUSHAPE l'abbiamo chiamata SICUREZZA FISIOLÓGICA.

Tutto questo a tutela dell'operatrice che è la prima responsabile della sicurezza nei confronti della cliente.

SPECIALISTI AL VOSTRO FIANCO

L'organizzazione scientifica di BLUSHAPE fornisce al cliente tutta la conoscenza necessaria per utilizzare al massimo delle loro potenzialità le apparecchiature, tenendo naturalmente conto delle capacità e della professionalità degli operatori.

I nostri corsi di formazione non comprendono solo una semplice spiegazione su come si usa l'apparecchiatura, ma trattano in maniera completa ed approfondita l'energia che si vuol utilizzare e quali sono le indicazioni della medicina per le relative applicazioni in estetica.

In questo modo l'operatrice avrà gli strumenti per poter costruire correttamente i propri protocolli di lavoro. Al fine di fidelizzare il cliente BLUSHAPE informa periodicamente le operatrici su aggiornamenti di tipo legislativo, normativo, tecnico e sullo sviluppo di nuove apparecchiature ed energie da integrare nei propri protocolli di lavoro.



IL PRESENTE CATALOGO, INCLUSE LE IMMAGINI RIPORTATE, E' PURAMENTE INDICATIVO PER IL PRODUTTORE. CONTINUI AGGIORNAMENTI TESI A MIGLIORARE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, POSSONO FAR VARIARE ANCHE NOTEVOLMENTE ASPETTO E CARATTERISTICHE DELLO STESSO.

ENDOSHAPE PRO

ENDOMASSAGGIO
A CONTROLLO PROPORZIONALE
VISO E CORPO



ENDOMASSAGGIO
A CONTROLLO
PROPORZIONALE
VISO E CORPO

APPROFONDIMENTO TECNICO SCIENTIFICO

ENDOSHAPE PRO

Integra e valorizza il lavoro dell'estetista

SISTEMI DI REGOLAZIONE

I sistemi di regolazione sia della potenza di aspirazione che dell'intensità del vuoto che si crea nella zona manipolo/cute permettono all'operatrice di avere una precisa reazione della cute all'endomassaggio.

CILINDRI

I cilindri interni consentono un'efficacia superiore e minore stress per la pelle trattata.

MANIPOLI

Molteplici aree di azione grazie ai pratici manipoli; oltre 50 cmq per il corpo (il manipolo con area trattata più grande oggi disponibile) fino a meno di 2 cmq nei distretti del viso.

Il dispositivo **ENDOSHAPE PRO** attraverso la tecnica di vuoto pulsato (fasi di depressione e compressione), sollecita vigorosamente la circolazione venolinfatica, con un effetto simil ventosa, responsabile di un maggior afflusso di sangue e di ossigeno nella zona trattata. Non solo lotta alla cellulite, ma una pelle in generale più compatta e drenata, anche per il viso.

Gli scopi finali e maggiormente visibili che si raggiungono sono quelli di:

- ridurre le adiposità localizzate e la cellulite.
- ridare elasticità alla cute.
- attenuare le rughe e le borse sotto gli occhi.
- drenare e stimolare i muscoli, in particolar modo dopo lo sforzo fisico.
- eliminare gli indolenzimenti.
- attenuare le smagliature.
- recuperare i prolapsi tissutali.



ENDOSHAPE PRO offre la possibilità a tutte le professioniste di utilizzare la metodica dell'Endomassaggio e massaggio connettivale strumentale, con estrema semplicità di utilizzo e facilità di integrazione nei protocolli di lavoro.

L'Endomassaggio sfrutta uno dei principi fisici più efficaci attualmente esistenti, il vuoto. Il massaggio endodermico è la scienza della stimolazione tissutale che permette di riattivare in profondità l'attività cellulare "lenta", mediante una stimolazione meccanica dell'epidermide con soluzioni indolori e non invasive; è un massaggio connettivale che si basa sulla tecnica del vuoto pulsato o continuo ed è molto efficace nel trattamento estetico delle pannicolopatie (liposclerosi o cellulite), nel drenaggio dei liquidi e nella tonificazione tissutale.

Con l'utilizzo dell'Endomassaggio, alla fine di un ciclo di trattamenti (10 sedute ca. ma se necessario anche di più a seconda della gravità dell'inestetismo da trattare) mediamente si è potuto constatare che la cute a buccia d'arancia si normalizza, l'edema localizzato si riduce, la dolorosità alla palpazione e la fibrosità o addirittura la sclerosi del tessuto diminuisce sensibilmente.

La letteratura sull'argomento indica che le cellule rispondono alla tensione rilasciando speciali recettori in superficie e attivando circuiti all'interno della cellula i quali favoriscono le attività lipolitiche e di rigenerazione. Attraverso, quindi, la stimolazione della migrazione dei fibroblasti e la stimolazione meccanica degli adipociti si ottengono da subito un aumento dell'attività metabolica, della proliferazione cellulare e la produzione di matrice extracellulare.

PRODOTTI COSMETICO/TECNICI INTEGRATIVI

Per un trattamento ideale si consiglia di utilizzare i prodotti tecnici BLUSHAPE appositamente formulati per l'uso in sinergia con il dispositivo **ENDOSHAPE**:



BODYSHAPE - ACTIVE DRY OIL

SCHEDA TECNICA

Dispositivo estetico conf al DM 206/2015



ENDOSHAPE PRO

Endomassaggio a Controllo Proporzionale Viso/Corpo

Inestetismi

Cellulite Compatta | Adipe Molle/Compatta | Rilassamento Cutaneo

Cicli Sedute

CICLO = 6-10 sedute a seconda dello stato iniziale

Uscite

N° 4 manipoli a massaggio endodermici viso micro, viso mid, décolletè e corpo, con rulli a doppia e tripla plica

Sistema di Programmazione

Digitale a 3 microprocessori - Interfaccia Display Touch LED color

Potenza massima di lavoro

Entro i valori massimi consentiti in ambito estetico dalla Ig 1/1990 e DM 206 del 15/10/2015

Frequenza generata

Entro i valori massimi consentiti in ambito estetico dalla Ig 1/1990 e DM 206 del 15/10/2015

Dati generali

Potenza assorbita: max 75 W | Alimentazione: 220 V 50 Hz | Dimensioni e pesi: 30x30x15h cm ca. 5 Kg ca.

EPIILTEK LASER EVOLUTION

L'EVOLUZIONE
NEI DISPOSITIVI LASER
PER EPILAZIONE PERMANENTE



L'EVOLUZIONE
NEI DISPOSITIVI LASER
PER EPILAZIONE PERMANENTE

EPILTEK LASER EVOLUTION

EPILTEK LASER EVOLUTION rappresenta l'evoluzione dei dispositivi laser per epilazione permanente.

PROGETTATO PER DURARE

EPILTEK LASER EVOLUTION ha una struttura completamente in acciaio, perspex ed alluminio anodato per conferire al dispositivo le solite caratteristiche di assoluta schermatura, sicurezza, robustezza ed unicità del design BLUSHAPE.

INDOLORE

Sistemi di raffreddamento evoluti ed efficienti garantiscono un ottimale raffreddamento della zona da trattare.

EVOLUTO

Il diodo di ultima generazione garantisce il risultato attaccando selettivamente il follicolo pilifero senza causare irritazioni alla pelle.

SICURO

EPILTEK LASER EVOLUTION non si ferma mai; infatti grazie ai **4 sistemi di raffreddamento** elettronici ed elettromeccanici il dispositivo sarà maggiormente protetto da sbalzi di temperatura e consentirà un funzionamento costante, sicuro e stabile.

La pompa di circolazione ha più del doppio della potenza dei comuni laser in commercio, cosa che consente l'utilizzo di un quantitativo inferiore di acqua e quindi semplifica la manutenzione del dispositivo stesso.



PROGETTATI E PRODOTTI IN ITALIA



APPROFONDIMENTO TECNICO SCIENTIFICO

L'epilazione laser è una tecnica efficace che garantisce una progressiva riduzione dei peli superflui. La tecnologia laser emette un fascio di luce che scalda il bulbo pilifero, agendo non solo sul fusto del pelo come la maggior parte delle più classiche tecniche di depilazione (rasoio, ceretta a caldo o a freddo, crema depilatoria), ma raggiungendone in profondità anche la radice; è nella fase anagen (il pelo si forma, cresce e si colora per effetto della melanina) che il laser colpisce miratamente la melanina concentrata nel bulbo pilifero, distruggendo in modo permanente tutte le strutture deputate alla formazione del pelo. Il risultato è un sensibile rallentamento della ricrescita ed una progressiva riduzione dei peli che, seduta dopo seduta, diventeranno una peluria rada e sottile.

Dopo aver acquisito esperienza nella progettazione e produzione di centinaia di laser per epilazione, puntando sempre alla qualità senza compromessi e ad una produzione tutta italiana, BLUSHAPE ha migliorato ulteriormente il dispositivo laser per epilazione permanente EPILTEK. L'esperienza maturata negli anni, durante i quali sempre più partner hanno scelto di operare professionalmente con i nostri dispositivi, ci ha arricchito di tutte quelle informazioni necessarie a perfezionare un prodotto già eccezionale.

I sistemi di raffreddamento devono essere particolarmente efficienti sia per preservare la durata del diodo laser, cuore del dispositivo, sia per avere un ottimo raffreddamento della zona da trattare. Sistemi di raffreddamento evoluti ed efficienti permettono all'estetista di lavorare in tutta tranquillità anche quando la temperatura dell'ambiente di lavoro è molto alta senza affaticare i circuiti elettronici di potenza del dispositivo.

PRODOTTI COSMETICO/TECNICI INTEGRATIVI

Per un trattamento ideale si consiglia di utilizzare i prodotti tecnici BLUSHAPE appositamente formulati per l'uso in sinergia con il dispositivo EPILTEK:

EPILTEK - ACTIVE LASER ANTIFREEZING GEL



SCHEDA TECNICA

Dispositivo estetico conf al DM 206/2015



EPILTEK LASER EVOLUTION

Dispositivo per FotoEpilazione Laser Diodo 808nm

Inestetismi
Irsutismo Peluria Viso/Corpo

Cicli Sedute
CICLO = 7-15 sedute a seconda dello stato iniziale

Lunghezza d'onda infrarossa
λ = 808 nm

Energia emessa al manipolo
Programmabile fino a max 40J/cmq (come da norma vigente)

Energia termica di raffreddamento al manipolo
80 W ca

Durata impulso IR laser
Programmabile fino a max 300 mS

4 SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO
N°2 termoelettronici - N°1 ad acqua - N°1 ad aria forzata

Classe laser internazionale di appartenenza
= IV (EN 60825)



FORMANOVA PRO

ELECTRODYNAMIC
MUSCULAR
SCULPTING



APPROFONDIMENTO TECNICO SCIENTIFICO

L'Electrodynamic Muscular Sculpting (EMS), è una tecnica che utilizza impulsi elettrici per attivare i tessuti del corpo ottenendo risultati simili all'allenamento fisico; può infatti aiutare a migliorare la condizione muscolare senza richiedere un grande sforzo fisico da parte dell'utente.

Agisce secondo principi studiati e confermati dalla scienza medica, riguardo al lavoro cui vengono indotti i distretti muscolari del nostro corpo quando vengono sottoposti ad una particolare energia esterna che li stimola e li fa contrarre (esattamente come succede con un lavoro volontario in palestra o con attrezzature specifiche).

Questo metodo non invasivo può essere utilizzato in ambito estetico per rimodellare il corpo; infatti è possibile intervenire con successo nel dimagrimento e nel rassodamento grazie alla contrazione muscolare che favorisce il drenaggio dei liquidi ed il processo interessato alla distruzione dei grassi: la lipolisi.

Inoltre, aiuta anche a migliorare l'elasticità cutanea, apportando miglioramenti all'estetica della cute.

FORMANOVA è spesso utilizzato per migliorare la forma corporea in modo sicuro e efficace, ma è fondamentale adottare uno stile di vita sano, compresa una dieta equilibrata per mantenere i risultati a lungo termine.

FORMANOVA PRO dispone di un sistema di programmazione eccezionalmente completo con la possibilità di utilizzare programmi preimpostati oppure un programma liberamente programmabile in tutti i suoi parametri secondo l'esperienza dell'operatore.

FORMANOVA PRO

FORMANOVA PRO è un dispositivo assolutamente innovativo per la tonificazione dei tessuti superficiali e soprattutto muscolari, sviluppato con una tecnologia a simmetria polare che garantisce i migliori risultati su tutto il corpo.

Conforme alle più recenti normative europee e mondiali sulla sicurezza dei dispositivi professionali per estetica, diversamente da altri apparecchi presenti sul mercato è assolutamente privo di effetti collaterali o di particolari limitazioni nell'utilizzo.

L'applicazione del dispositivo, mediante elettrodi classici per campi elettrici, segue la fisiologia ed anatomia dell'organismo, mentre il sistema di programmazione è stato studiato per permettere all'operatrice di impostare il lavoro desiderato (DIMAGRIMENTO, TONIFICAZIONE MUSCOLARE e molti altri) lasciando operare poi il dispositivo in totale autonomia.

FORMANOVA PRO è dotato di numerosi programmi, studiati per tutte le più importanti azioni sugli inestetismi di pertinenza dei campi elettrici.

Tali programmi prevedono tutti i parametri, le sequenze di lavoro e le tempistiche preimpostati così che al/la professionista non resta che applicare i dispositivi di trasferimento ed avviare il trattamento.

I VANTAGGI

- Consente di ottenere risultati in tempi più brevi rispetto all'allenamento tradizionale. Le contrazioni muscolari indotte sono intense e mirate, riducendo la necessità di lunghe sessioni di allenamento; infatti in una sola seduta di 20 minuti, riusciamo ad applicare un carico di lavoro pari a svariate ore di palestra
- Permette di lavorare su inestetismi dove con la normale attività sportiva non si riescono ad ottenere risultati soddisfacenti
- Aiuta il recupero muscolare
- Consente di adattare l'intensità e la frequenza degli impulsi alle esigenze individuali, garantendo un allenamento sicuro e efficace
- Si possono allenare specifiche aree del corpo per un lavoro mirato ed efficace oppure lavorare in maniera più generica per ottenere un allenamento a tutto tondo
- A differenza dell'allenamento tradizionale, l'EMS non richiede il movimento articolare e può essere utilizzato da persone con limitazioni fisiche

PRODOTTI COSMETICO/TECNICI INTEGRATIVI

Per un trattamento ideale si consiglia di utilizzare i prodotti tecnici BLUSHAPE appositamente formulati per l'uso in sinergia con il dispositivo FORMANOVA PRO:

KONTACT - ACTIVE CONTACT GEL



SCHEDA TECNICA

Dispositivo estetico conf al DM 206/2015



FORMANOVA PRO

Tonificatore Corpo Programmato | Coadiuvante Dimagrimento | Coadiuvante Estetico | Rivascolarizzante
Miglioramento del Metabolismo per fini estetici

Inestetismi

Rilassamento Muscolare | Rilassamento Cutaneo | Inestetismi Circolatori

Cicli Sedute

CICLO = 10-20 sedute a seconda dello stato iniziale

Uscite

N° 4 ch / 8 out canali (8/16 elettrodi) a simmetria polare

Sistema di Programmazione

Digitale a 3 microprocessori - Interfaccia Display Touch LED color

Potenza massima di lavoro

Entro i valori massimi consentiti in ambito estetico dalla lg 1/1990 e DM 206 del 15/10/2015

Frequenza generata

Entro i valori massimi consentiti in ambito estetico dalla lg 1/1990 e DM 206 del 15/10/2015

Dati generali

Potenza assorbita: max 80 W | Alimentazione: 220 V 50 Hz | Dimensioni e pesi: 30x30x15h cm ca. 5 Kg ca.



KLINSET

PROTOCOLLO
COMPLETO
VISO



PROTOCOLLO COMPLETO VISO

KLINSET

Le 4 energie della KLINSET

1 MICRODERMOABRASIONE

- Elimina le cellule danneggiate della pelle.
- Ossigena i tessuti.
- Stimola il turnover cellulare.

2 OZONO JONIZZATO

- Purifica e pulisce a fondo i pori della pelle.
- Elimina dai pori le impurità dell'inquinamento ambientale (fumo, aria chiusa, etc...).

3 TERMOFORESI

- Richiama un elevato afflusso sanguigno nella zona trattata.
- Veicola immediatamente i principi attivi del prodotto cosmetico.

4 TERMOFREQUENZA®

- Straordinari risultati sugli inestetismi provocati da età o da stress.
- Addio ai fastidiosi effetti collaterali della vecchia radiofrequenza.



PROGETTATI E PRODOTTI IN ITALIA



APPROFONDIMENTO TECNICO SCIENTIFICO

KLINSET è il nuovo dispositivo per trattamenti viso ad energie combinate, pensato per fornire all'operatore estetico una stazione completa per la pulizia e la cura profonda del viso.

Il dispositivo, attraverso la sua Evoluta Microdermoabrasione, elimina le cellule danneggiate della pelle rimuovendone lo strato superficiale, ottenendo l'ossigenazione dei tessuti e la stimolazione al turnover cellulare. Tale azione, unita al trattamento di Ossigeno/Ozono e di Termoforesi, permetterà all'operatore estetico di raggiungere i migliori risultati nel trattamento di inestetismi dovuti ad acne e affini, età ed iperpigmentazione.

OZONOJONIZZATO - Genera un'azione di contrasto agli inestetismi prodotti dalle azioni batteriche causa di acne o altre problematiche cutanee. Pulisce a fondo elettricamente la pelle in quanto depolarizza gli ioni positivi che si depositano sulla stessa a causa dell'inquinamento ambientale (fumo, aria chiusa, etc etc). Ciò consente di liberare i pori occlusi e di lasciar respirare la pelle stessa, consentendo inoltre un'altissima penetrazione del prodotto cosmetico.

TERMOFORESI - L'altissima capacità di veicolare i principi attivi contenuti nei prodotti cosmetici è un'altra caratteristica di questo straordinario dispositivo; infatti grazie al trattamento Termoforetico la KLINSET fa sì che nella zona trattata ci sia un elevato richiamo sanguigno che permetterà la diffusione immediata del prodotto.

TERMOFREQUENZA® - KLINSET dispone anche dell'ultimo ritrovato energetico per trattamenti antiaging viso; la Termofrequenza®, energia esclusiva a marchio registrato BLUSHAPE. Grazie a questo tipo di energia termica, si riescono ad ottenere straordinari risultati sugli inestetismi provocati da età o da stress, senza avere i fastidiosi effetti collaterali della radiofrequenza di tipo classico.

La particolare generazione di questo tipo di energia termica consente una cessione più graduale del calore prodotto ai tessuti trattati, riuscendo a raggiungere anche quelli situati in profondità; questo fa sì che il trattamento risulti più piacevole ed enormemente più efficace.

PRODOTTI COSMETICO/TECNICI INTEGRATIVI

Per un trattamento ideale si consiglia di utilizzare i prodotti tecnici BLUSHAPE appositamente formulati per l'uso in sinergia con il dispositivo KLINSET:

TERMOFREQUENZA® VISO - ACTIVE GEL VISO

OZONEACTIVE - SOLUZIONE ATTIVA DA NEBULIZZARE



SCHEDA TECNICA

Dispositivo estetico conf al DM 206/2015



KLINSET

Microdermoabrasione Multitestine | Ozono/Ossigeno Viso | Micronizzazione Veicolazione Prodotti
Micromassaggio Cutaneo | Termoforesi Viso

Inestetismi

Antiaging Viso | Scarsa Luminosità | Iperpigmentazione

Cicli Sedute

CICLO = 5-10 sedute a seconda dello stato iniziale

Uscite

N° 1 aerografo MICRONIZZAZIONE PRODOTTI
N° 1 manipolesso massaggio OZONO
N° 1 manipolesso MICRODERMOABRASIONE
N° 1 manipolesso TERMOFORESI e TERMOFREQUENZA

Sistema di Programmazione

Digitale a 3 microprocessori - Interfaccia Display Touch LED color

Potenza massima di lavoro

Entro i valori massimi consentiti in ambito estetico dalla Ig 1/1990 e DM 206 del 15/10/2015

Frequenza generata

Entro i valori massimi consentiti in ambito estetico dalla Ig 1/1990 e DM 206 del 15/10/2015

Dati generali

Potenza assorbita: max 75 W | Alimentazione: 220 V 50 Hz | Dimensioni e pesi: 30x30x15h cm ca. 5 Kg ca.



E-PRESS R-PRESS PRO IR

PRESSOMASSAGGIO
PROFESSIONALE




E-PRESS R-PRESS PRO IR

E-PRESS ed R-PRESS PRO IR sono i dispositivi estetico/professionali per pressomassaggio, studiati per avere la massima efficacia nell'attivare i processi fisiologici di rilassamento e circolazione del corpo. Utilizzano l'energia meccanica alternata, una tecnica fisiologica il cui scopo principale è quello di ridurre il gonfiore di origine linfatica o venosa nonché di facilitare la circolazione periferica e l'assorbimento di residui circolatori dopo l'affaticamento muscolare.

Questo comporta una riduzione di inestetismi come Cellulite, ritenzione liquidi, sovrappeso ed ectasie.


BENEFICI DEL PRESSOMASSAGGIO

- Migliora la circolazione sanguigna e quella linfatica
- Riduce il gonfiore e l'edema
- Riduce gli stati infiammatori di natura non-infettiva
- Migliora l'ossigenazione cutanea
- Migliora il tono e l'integrità della pelle
- Riduce con buoni risultati la cellulite e ridefinisce la forma delle gambe
- Allevia il dolore indotto da alcuni traumi sportivi
- Riduce l'edema post-traumatico
- Favorisce l'eliminazione delle tossine e dei prodotti di scarto
- Riduce lo stress e favorisce il rilassamento

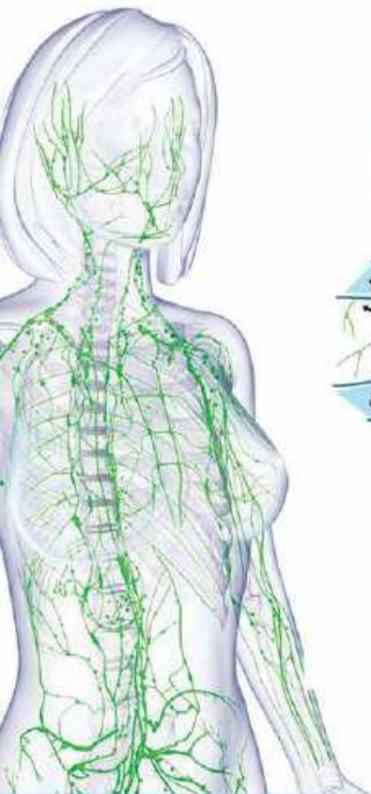

Esempio di Onda Pressoria

Le sacche si riempiono d'aria comprimendo l'arto. La compressione dei vasi aumenta il flusso emolinfatico e di conseguenza il drenaggio dei liquidi

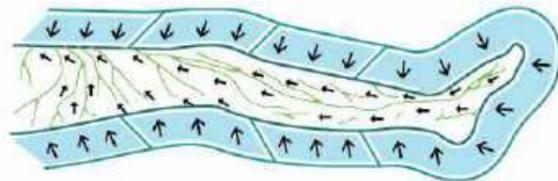

E-PRESS e R-PRESS PRO IR sono tra i pochi dispositivi estetico/professionali per pressomassaggio, progettati e prodotti interamente in Italia. Qualità, sicurezza e certificazione italiana



APPROFONDIMENTO TECNICO SCIENTIFICO

Il trattamento effettuato dai dispositivi Blushape per pressomassaggio, è capace di esercitare una pressione esterna sugli arti del/della cliente facilitando il drenaggio del liquido interstiziale e dei soluti che vi si trovano.

Viene attivata inoltre la circolazione venosa liberando l'ambiente extracellulare dalle scorie che costantemente vi riversano le cellule.

La pressione viene esercitata secondo una sequenza che è quella seguita dal sangue venoso e dalla linfa.

I dispositivi hanno inoltre la particolarità di rilassare chi vi si sottopone producendo un senso di benessere generale e di leggerezza degli arti coinvolti.

LE CAMERE DI COMPRESSIONE

Entrambi i dispositivi utilizzano una connessione funzionale tra le camere gonfiabili (sistema di gonfiaggio progressivo a camere sovrapposte) che consente di ottenere un'onda pressoria uniforme ed omogenea lungo tutte le sezioni, indipendentemente dalla dimensione dell'arto. Ben 10 settori attivi comprendenti gambe braccia addome glutei riescono ad effettuare un trattamento in modo completo e risolutivo.

E-Press e R-Press sono dotate di un sofisticato ed affidabile sistema di rilevamento della pressione all'interno delle camere di espansione, così da poter effettuare il trattamento nel rispetto dell'esatta pressione programmata dall'operatore.

ENERGIA INFRAROSSA (disponibile solo nel modello R-PRESS PRO IR)

L'associazione al pressomassaggio professionale dell'energia termica infrarossa, consente di moltiplicare l'efficacia del risultato agendo sul microcircolo dei tessuti e facilitando l'assorbimento per termoforesi di eventuali prodotti attivi utilizzati nel trattamento.

PRODOTTI COSMETICO/TECNICI INTEGRATIVI

Per un trattamento ideale si consiglia di utilizzare i prodotti tecnici BLUSHAPE appositamente formulati per l'uso in sinergia con i nostri dispositivi Professionali per Pressomassaggio:



TERMOFREQUENZA®CORPO - ACTIVE GEL CORPO

SCHEDA TECNICA

Dispositivo estetico conf al DM 206/2015



E-PRESS R-PRESS PRO IR

Pressomassaggio Professionale, 10 Canali a camere separate

Inestetismi

Inestetismi Circolatori Corpo | Linfodrenaggio

Cicli Sedute

CICLO = 6-10 sedute a seconda dello stato iniziale

Uscite E-PRESS

N° 1 marsupio completo di 10 settori pneumatici

Uscite R-PRESS PRO IR

N° 1 marsupio completo di 10 settori pneumatici
+ 5 SETTORI TERMICI AD ENERGIA INFRAROSSA

Sistema di Programmazione

Digitale a 3 microprocessori - Interfaccia Display Touch LED color

Potenza massima di lavoro

Entro i valori massimi consentiti in ambito estetico dalla Ig 1/1990 e DM 206 del 15/10/2015

Frequenza generata

Entro i valori massimi consentiti in ambito estetico dalla Ig 1/1990 e DM 206 del 15/10/2015

Dati generali

Potenza assorbita: max 75 W | Alimentazione: 220 V 50 Hz | Dimensioni e pesi: 30x30x15h cm ca. 5 Kg ca.

SKINTONE LIFT

TRATTAMENTO
ENDOTERMICO
VISO/CORPO



TRATTAMENTO
ENDOTERMICO
VISO/CORPO

SKINTONE LIFT

SKINTONE LIFT è il sistema di trasferimento energetico ENDOTERMICO a TERMOFREQUENZA® che permette di trattare efficacemente i tessuti superficiali e mediamente profondi della pelle del viso.

Le sue grandi capacità di trasferire energia nei tessuti fanno sì che nella zona trattata ci sia un elevato richiamo sanguigno che produce un immediato cambiamento sulla luminosità ed apparente ringiovanimento della pelle.

La vasodilatazione indotta infatti consente il rimettersi in moto dei meccanismi fisiologici che riportano i tessuti ad un loro regolare metabolismo.

TERMOFORESI

La SKINTONE LIFT, per le caratteristiche particolari della sua emissione energetica a TERMOFREQUENZA®, presenta una particolare capacità di veicolazione di prodotti cosmetici con principi attivi.

Qualsiasi molecola con caratteristiche dimensionali adeguate può essere veicolata ed assorbita in grande quantità dalla cute a prescindere dalla sua polarità.

In pratica la TERMOFREQUENZA® unisce i vantaggi dell'infrarosso, con la sua grande capacità di veicolare i principi attivi cosmetici ed il lavoro endotermico sui tessuti superficiali, a quelli della radiofrequenza classica che tratta più intensamente i tessuti profondi.

Infine è da sottolineare il fatto che la TERMOFREQUENZA unisce i vantaggi di Infrarossi e Radiofrequenza senza ereditarne gli aspetti negativi e/o controindicazioni.

SKINTONE LIFT garantisce grandi risultati e la miglior sinergia APPARECCHIO-PRODOTTO COSMETICO.

La SKINTONE LIFT è corredata di un manipolo specifico per il viso e décolleté ed è programmata per il trattamento dei più frequenti inestetismi del viso e del corpo.



PROGETTATI E PRODOTTI IN ITALIA



APPROFONDIMENTO TECNICO SCIENTIFICO

Le energie termiche sono le più utilizzate in estetica, in particolare per indurre una vascolarizzazione (richiamo sanguigno) utile al miglioramento del microcircolo periferico e/o la vascolarizzazione di zone ischemizzate.

AZIONE DELLA TERMOFREQUENZA SULL' INESTETISMO VISO

Tonificazione evidente della pelle con riduzione della marcatura delle rughe e del rilassamento cutaneo. Si nota immediatamente, anche dopo la singola seduta, una maggiore luminosità della pelle ed un globale effetto di ringiovanimento. Questo è dovuto al richiamo sanguigno nei tessuti sottocutanei della pelle del viso e nei muscoli pelliccioli (ancora quelli del viso) che con l'apporto di ossigeno riporta gli scambi metabolici all'efficienza corretta. Il richiamo sanguigno si stabilizza notevolmente dopo un ciclo di sedute sostenute dal corretto protocollo indicato dall'operatore.

AZIONE DELLA TERMOFREQUENZA SULL' INESTETISMO CORPO

Sul corpo la Termofrequenza esercita un'ottima azione sui principali inestetismi in particolare se localizzati. Anche qui, come per il viso, l'azione del richiamo sanguigno nei tessuti, in particolare in quelle aree affette da cellulite o adipe (di per se quindi poco vascolarizzate), con l'apporto di ossigeno, riporta gli scambi metabolici all'efficienza corretta. L'ineestetismo legato ai due fattori citati si riduce notevolmente soprattutto in quei soggetti dove lo si trova localizzato in alcuni distretti corporei.

PRODOTTI COSMETICO/TECNICI INTEGRATIVI

Per un trattamento ideale si consiglia di utilizzare i prodotti tecnici BLUSHAPE appositamente formulati per l'uso in sinergia con il dispositivo KLINSET:

TERMOFREQUENZA® VISO - ACTIVE GEL VISO

TERMOFREQUENZA® CORPO - ACTIVE GEL CORPO



SCHEDA TECNICA

Dispositivo estetico conf al DM 206/2015



SKINTONE LIFT

Trasferimento Energia Endogena Viso e Corpo | Veicolazione Prodotti

Inestetismi

Antiaging Viso e Décolleté | Adipe / Cellulite | Rilassamento Cutaneo

Cicli Sedute

CICLO = 6-20 sedute a seconda del tipo di inestetismo Viso o Corpo e dello stato iniziale

Uscite

N° 3 manipoli endotermici viso, décolleté e corpo a TERMOFREQUENZA

Sistema di Programmazione

Digitale a 3 microprocessori - Interfaccia Display Touch LED color

Potenza massima di lavoro

Entro i valori massimi consentiti in ambito estetico dalla Ig 1/1990 e DM 206 del 15/10/2015

Frequenza generata

Entro i valori massimi consentiti in ambito estetico dalla Ig 1/1990 e DM 206 del 15/10/2015

Dati generali

Potenza assorbita: max 75 W | Alimentazione: 220 V 50 Hz | Dimensioni e pesi: 30x30x15h cm ca. 5 Kg ca.

STARBODY

MODELLA IL CORPO IN COMPLETO RELAX



STARBODY

MODELLA IL CORPO
IN COMPLETO RELAX

STARBODY è un dispositivo per trattamenti corpo statici (cosiddetti di posa) che sfrutta i benefici di due energie che lavorano in sinergia per modellare il corpo.

TERMOFREQUENZA®

LIPOLASER

La TERMOFREQUENZA® è l'innovativa energia termica, esclusiva BLUSHAPE, che consente di raggiungere i migliori risultati ottenibili con le classiche energie termiche come Infrarossi e Radiofrequenza ma senza i fastidiosi effetti collaterali di queste ultime.

Il dispositivo STARBODY consente l'applicazione della TERMOFREQUENZA® mediante 12 moduli fissi per trattamenti statici, senza la presenza costante dell'operatore, per ottenere i migliori risultati con questa metodica su inestetismi localizzati.

Diversamente da un semplice Lipolaser la STARBODY offre quindi la possibilità di:

- Veicolare qualsiasi prodotto cosmetico grazie all'elevata capacità Termoforetica della TERMOFREQUENZA®
- Tonificare e migliorare situazioni di biotrofismo cellulare grazie al SOFT LASER ad IR (LIPOLASER)

Due energie che lavorano in sinergia in modo mirato per raggiungere i migliori risultati sui depositi di grasso in eccesso.

Se desiderate molto di più di un semplice LIPOLASER, STARBODY è il dispositivo che fa per voi.



PROGETTATI E PRODOTTI IN ITALIA



APPROFONDIMENTO TECNICO SCIENTIFICO

Il Lipolaser è un trattamento indolore e non invasivo che permette di agire in modo mirato sui depositi di grasso in eccesso. La formula innovativa della STARBODY, vede l'inserimento della TERMOFREQUENZA® come energia sinergica all'interno di un protocollo di lavoro completo che ha come obiettivo la correzione degli inestetismi dovuti ad eccessi e accumuli di tessuto adiposo, affiancando un percorso virtuoso di attività fisica e corretta dieta alimentare.

Il trattamento vede l'applicazione di placche sulle zone critiche; l'emissione delle due energie attiva gli emettitori che, in maniera graduale e assolutamente non stressante per la zona trattata, raggiungono lo strato più superficiale dell'adipe dove si deposita il grasso in eccesso.

Nei distretti affetti da gravi inestetismi cellulari l'azione della TERMOFREQUENZA® ha due effetti:

- Il richiamo nella zona trattata di sangue ricco di nutrimento
- La diffusione immediata per Termoforesi del prodotto cosmetico ricco di sostanze attive

Un trattamento estetico assolutamente non invasivo, che rispetta la naturale fisiologia dell'organismo di chi vi si sottopone e dell'area da trattare (solitamente addome, cosce, circonferenza vita e fianchi), in modo da raggiungere il risultato desiderato.

PRODOTTI COSMETICO/TECNICI INTEGRATIVI

Per un trattamento ideale si consiglia di utilizzare i prodotti tecnici BLUSHAPE appositamente formulati per l'uso in sinergia con il dispositivo STARBODY:

TERMOFREQUENZA® CORPO - ACTIVE GEL CORPO



SCHEDA TECNICA

Dispositivo estetico conf al DM 206/2015



STARBODY

Generatore Laser IR | Generatore TERMOFREQUENZA® | Trattamento Statico a 12 settori | TERMOFREQUENZA® + LIPOLASER

Inestetismi

Cellulite | Adipe | Rilassamento Cutaneo

Cicli Sedute

CICLO = 10-12 sedute a seconda dello stato iniziale

Uscite

N°12 manipoli fissi a DOPPIA ENERGIA SOFT-LASER IR e TERMOFREQUENZA®

Sistema di Programmazione

Digitale a 3 microprocessori - Interfaccia Display Touch LED color

Potenza massima di lavoro

Entro i valori massimi consentiti in ambito estetico dalla lg 1/1990 e DM 206 del 15/10/2015

Frequenza generata

Entro i valori massimi consentiti in ambito estetico dalla lg 1/1990 e DM 206 del 15/10/2015

Dati generali

Potenza assorbita: max 125 W | Alimentazione: 220 V 50 Hz | Dimensioni e pesi: 30x30x15h cm ca. 5 Kg ca.



TERMOKINETIC PRO

DISPOSITIVO PER TRATTAMENTI
A TRASFERIMENTO
DI CALORE A DOPPIO
FLUSSO



DISPOSITIVO PER TRATTAMENTI
A TRASFERIMENTO
DI CALORE A DOPPIO
FLUSSO

TERMOKINETIC® PRO

Il TERMOKINETIC® PRO è il dispositivo compendio di anni di successi nelle applicazioni estetiche su inestetismi viso/corpo di varia natura.

TERMOKINESI

L'energia termica TERMOKINESI® consente di cedere calore ai tessuti in modalità bidirezionale, inducendo così uno spostamento termico continuo e stabile per tutta la durata dell'applicazione. Tale azione risulta essere la più efficace per vascolarizzare quei distretti corporei che per varie ragioni non risultano correttamente raggiunti dal sangue, in modo da ripristinare le corrette azioni metaboliche e nutritive dei tessuti.

Il sistema attivo del Termokinetic Pro utilizza la fisiologia del corpo per trattamenti risolutivi e stabili nel tempo; dove il nostro organismo è in difficoltà (Es: cattiva circolazione sanguigna periferica o lassità per perdita di tono muscolare e tissutale) e la nostra fisiologia non è più in grado di produrre con efficacia le energie necessarie per risolvere un problema estetico, il dispositivo TERMOKINETIC® PRO interviene agendo sugli inestetismi causati dal microcircolo, sul tono dei tessuti ed a livello cellulare.

POTENTE

TERMOKINETIC PRO, pur rimanendo nei limiti definiti dalla normativa vigente, ha una potenza tripla (UCT 3) che, rispetto ai modelli precedenti, consente di poter lavorare su tessuti più profondi e più velocemente.

VERSATILE

5 adattatori facilmente intercambiabili sul manipolo, consentono di passare da 50 cmq di azione, per aree corpo più grandi, fino ad una superficie puntiforme < 1 cmq per il trattamento della singola ruga.

PROFESSIONALE

Il software di programmazione prevede la completa impostazione dei parametri della TERMOKINESI®. Al suo interno sono presenti pagine informative sui protocolli utilizzati per trattare i più importanti inestetismi nel modo più efficace. Questi protocolli sono il risultato della teoria medica di trasferimento dell'energia nei tessuti e dell'esperienza sul campo dei centri specializzati BLUSHAPE.



APPROFONDIMENTO TECNICO SCIENTIFICO

AZIONE

Le energie su cui basa la sua azione sono quanto di più consolidato e provato dalla fisica e dalla medicina estetica; tali energie non possono avere l'efficacia desiderata se non si superano limiti dettati dalla struttura dei tessuti e dalle modalità di generazione dell'energia stessa. Il TERMOKINETIC® PRO ha superato questi limiti applicativi grazie allo studio del suo sistema attivo.

ENERGIE FISILOGICHE - RISULTATI DURATURI

E' noto che per ottenere risultati nel trattamento di inestetismi è indispensabile utilizzare nelle zone interessate energie adeguate e mirate a combattere gli effetti delle cause che provocano l'inestetismo stesso. Tali energie, perché il trattamento sia risolutivo e stabile nel tempo, devono essere di tipo fisiologico, cioè analoghe alle forme di energia abitualmente messe in gioco dal nostro organismo; in sostanza è necessario provvedere ad intervenire dove la nostra fisiologia non riesce più ad essere efficace, utilizzando però le stesse armi, le uniche in grado di combattere il problema.

Inestetismi come quelli provocati dalla cellulite, dall'eccesso di adipe, dal rilassamento cutaneo (dovuti all'età oppure come conseguenza di forti dimagrimenti), tutti quelli che riguardano i tessuti del viso, in pratica ogni inestetismo è riconducibile alle carenze degli interventi riparatori da parte del nostro organismo (Es: cattiva circolazione sanguigna periferica o lassità per perdita di tono muscolare e tissutale).

In sostanza la nostra fisiologia, per vari motivi non è più in grado di produrre con efficacia, in loco, le energie necessarie per risolvere il problema. Il dispositivo TERMOKINETIC® PRO interviene proprio qui; grazie al suo innovativo sistema a Termokinesi unito ad un protocollo operativo messo a punto in anni di studi e perfezionamenti, il TERMOKINETIC® PRO interviene in maniera straordinariamente efficace e spesso risolutiva sugli inestetismi del viso e del corpo, agendo come nessun altro dispositivo ugli inestetismi causati dal microcircolo e sul tono dei tessuti, nonché a livello cellulare.

PRODOTTI COSMETICO/TECNICI INTEGRATIVI

Per un trattamento ideale si consiglia di utilizzare i prodotti tecnici BLUSHAPE appositamente formulati per l'uso in sinergia con il dispositivo TERMOKINETIC® PRO:



TERMOKINESI® - ACTIVE GEL

SCHEDA TECNICA

Dispositivo estetico conf al DM 206/2015



TERMOKINETIC PRO

Dispositivo per il Trattamento a Trasferimento di Calore

Inestetismi Viso

Rivascolarizzazione Tissutale Estetica | Antiaging Viso | Trattamento di Borse ed Occhiaie | Antiaging Collo e Decolleté
Rilassamento Cutaneo | Atonia | Veicolazione Prodotti Attivi

Inestetismi Corpo

Cellulite Adiposa, Compatta e Fibrosa | Cellulite Molle | Adipe | Rilassamento Cutaneo | Atonia | Veicolazione Prodotti Attivi

Energia Generata

Calore a doppio flusso

Sistema di Programmazione

Digitale a 3 microprocessori - Interfaccia Display Touch LED color

Potenza massima di lavoro

Entro i valori massimi consentiti in ambito estetico dalla Ig 1/1990 e DM 206 del 15/10/2015

Dati generali

Potenza assorbita: max 75 W | Alimentazione: 220 V 50 Hz | Dimensioni e pesi: 30x30x15h cm ca. 5 Kg ca.



MONOLITH XE

CARRELLO
DISPOSITIVI
CLASSE X

Caratteristiche:

Struttura in metallo a 2 ripiani

Colore bianco

Estremamente resistente

Dispone di 4 ruote girevoli che facilitano la manovrabilità.

Dati Tecnici:

Misure Generali: 30x30x74 cm.

Misure Ripiano: 30x30 cm

Peso c.a. : 10 kg



COSMETICI TECNICI

Avvalendosi dell'appoggio di aziende leader nella formulazione e produzione di cosmetici professionali, i nostri ricercatori hanno creato una linea di elevata qualità, nata dall'esigenza di avere prodotti specifici da utilizzare in sinergia con i dispositivi Blushape.

Siamo convinti che per ottenere i risultati migliori nel trattamento di inestetismi Viso e/o Corpo, ci si debba avvalere dell'azione sinergica fra Dispositivo Professionale, Prodotto Cosmetico e Professionalità dell'Operatore/Operatrice estetico; per questo motivo abbiamo ideato cosmetici innovativi ed efficaci per contrastare i principali inestetismi del viso e del corpo, contenenti molecole naturali che rispettano e salvaguardano l'ambiente, senza l'utilizzo di derivati animali o di Parabeni e Paraffine.

Tutti i prodotti della linea sono caratterizzati da un alto indice di penetrazione, agiscono in profondità, e hanno la giusta percentuale di sostanze funzionali per l'ottimizzazione dei risultati estetici.

MONOLITH SE

CARRELLO
DISPOSITIVI
CLASSE S

Caratteristiche:

Struttura in metallo e alluminio a 2 ripiani

Colore nero / bianco

Estremamente resistente

Dispone di 4 ruote girevoli che facilitano la manovrabilità.

Dati Tecnici:

Misure Generali: 49x33x70 cm

Misure Ripiano: 49x33 cm

Peso c.a. : 15 kg

Prodotto	Formato	Dispositivo Blushape
TERMOFREQUENZA - ACTIVE GEL CORPO	500ml	Starbody - Press - Skintone Lift
TERMOFREQUENZA - ACTIVE GEL VISO	250ml	Klinset - Skintone Lift
BODYSHAPE - ACTIVE DRY OIL	240ml	Endoshape Pro
OZONEACTIVE - SOLUZIONE ATTIVA DA NEBULIZZARE	50ml	Klinset
TERMOKINESI - ACTIVE ANTIFREEZING GEL	500ml	Termokinetic Pro
EPILTEK - ACTIVE LASER NO FREEZING GEL	500ml	Epiltek Laser Evolution
KONTACT - ACTIVE CONTACT GEL	500ml	Formanova Pro
SKINCARE FACE	250ml	Crema Viso chiusura protocolli

TERMO KINESI®

TERMOKINETIC®

sono marchi registrati di proprietà dell'azienda Equinox039 srl.

Questo tipo di energia, esclusiva Blushape, è stata progettata e sviluppata dalla nostra azienda al fine di migliorare trattamenti termici tradizionali in estetica avanzata.

TERMOFREQUENZA®

è un marchio registrato di proprietà dell'azienda Equinox039 srl.

Questo tipo di energia, esclusiva Blushape, è stata progettata e sviluppata dalla nostra azienda al fine di migliorare trattamenti termici tradizionali in estetica avanzata.

La TERMOFREQUENZA in 5 punti

- 1 Possibilità di trattare i tessuti nella loro totalità, superficiali e profondi, unendo i vantaggi di un trattamento ad infrarossi e di radiofrequenza.
- 2 Possibilità di eseguire il trattamento con procedure lente di massaggio che consentono all'energia di penetrare nei tessuti senza stressarli.
- 3 Assoluta mancanza del rischio di scottature da "arco voltaico".
- 4 Campo elettromagnetico generato scarsissimo, cosa che esclude effetti collaterali sugli operatori che lavorano con il dispositivo tutto il giorno.
- 5 Grande capacità di veicolazione di principi attivi per via termoforetica.



Ogni dispositivo BLUSHAPE è progettato e realizzato con la più avanzata tecnologia per la medicina estetica così da essere conforme a tutte le normative di sicurezza per l'utilizzo di dispositivi da parte degli istituti di estetica.

BLUSHAPE si è sempre impegnata per mettere a disposizione dell'estetista apparecchiature conformi alla normativa di sicurezza e il cui utilizzo è autorizzato dalla legge vigente.

Lo staff di progettisti BLUSHAPE è costantemente impegnato ad attenersi alle disposizioni in materia in modo da garantire alle sue clienti la tranquillità di utilizzare solo dispositivi autorizzati.

Tutti gli apparecchi BLUSHAPE risultano appartenenti ai dispositivi consentiti alle estetiste.

La conformità di sicurezza va oltre e si spinge anche alla totale sicurezza fisiologica che garantisce la mancanza di controindicazioni o effetti collaterali tipiche invece di altre apparecchiature.

Tutti i dispositivi BLUSHAPE appartengono alle categorie di dispositivi elettromeccanici per uso estetico in base alla vigente legge 1/1990 ed al recente DM 206 del 15/10/2015 con relativa conformità alle rispettive schede tecniche allegate.

MADE IN ITALY

IL PRESENTE CATALOGO, INCLUSE LE IMMAGINI RIPORTATE, È PURAMENTE INDICATIVO PER IL PRODUTTORE. CONTINUI AGGIORNAMENTI TESI A MIGLIORARE LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, POSSONO FAR VARIARE ANCHE NOTEVOLMENTE ASPETTO E CARATTERISTICHE DELLO STESSO.

CE

BLUSHAPE

MADE IN ITALY



INFO@BLUSHAPE.IT
WWW.BLUSHAPE.IT

